

## Gebruiksaanwijzing Bluetooth® Neklus Hanger



Environmental  
friendly



**Waarschuwing: Gebruik dit voorwerp niet in de buurt van machines**


**Waarschuwing: Gebruik de Neklus Hanger niet als u een Pace maker of enig ander apparaat gebruikt dat gevoelig is voor een magnetisch/inductief veld.**

**Belangrijk: De Neklus Hanger t komt uit de fabriek met een minimaal geladen batterij. Voordat u de Neklus Hanger voor het eerst in gebruik neemt, moet de Neklus Hanger tenminste 8 uur opgeladen worden, pas dan kunt u deze samen met uw mobiele telefoon gebruiken. Let op dat uw niet verstrikt raakt als uw de lus gebruikt.**

### Inhoud:

Dragen van de Neklus Hanger	01
Opladen van de batterij	01
Aanzetten van de Neklus Hanger	02
Uitzetten van de Neklus Hanger	02
Verbinding tussen de Neklus Hanger en een gehoorapparaat	03
Aansluiting van de Bluetooth aan de mobiele telefoon aan de mobiele telefoon	03
Tot stand komen van de Bluetooth verbinding	04
Beantwoorden van binnenkomend telefoongesprek	05
Beëindigen van telefoongesprek	06
In de wacht zetten van telefoongesprek	07
Dempen van de microfoon	07
Doorschakelen van telefoongesprekken (Voor Nokia N5700 of gelijksoortige modellen)	08
Nummer kiezen met spraakherkenning	09
Numerherhaling (alleen bij mobiele telefoons met handsfree mogelijkheid)	10
Afwijzen van een telefoongesprek	10
Afstellen van de volume	11
Batterijoplaad aanduiding	11
Batterij opladen	11
LED status	12
Storingen verhelpen	13
Onderhoud en verzorging	14
CE verklaring	15
Verklaring van overeenstemming	16

### Neklus Hanger afbeeldingen

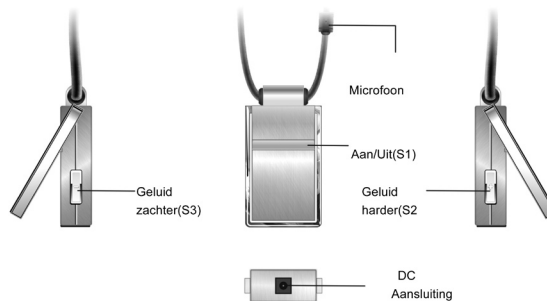

01

#### Dragen van de Neklus Hanger

Hang de Neklus Hanger om uw nek.

01

#### Opladen van de batterij

Wij danken u voor de aankoop van de nieuwe Neklus Hanger BH03 met Bluetooth draadloze technologie. Voor dat u de Neklus Hanger de eerste keer gebruikt, is het belangrijk dat u de batterij oplaadt tot de rode LED lamp uitgaat.

02

#### Aanzetten van de Neklus Hanger

Als u de Neklus Hanger aan wilt zetten, druk de S1 toets in en houd die vast tot de blauwe LED lamp aangaat. De blauwe LED lamp zal om de 3 seconden oplichten.

02

#### Uitzetten van de Neklus Hanger

Om de Neklus Hanger uit te zetten is, druk de S1 toets in en houd die vast tot de rode LED lamp aangaat.

03

#### Verbinding tussen de Neklus Hanger en een gehoorapparaat

De Neklus Hanger kan met uw gehoorapparaat in de T-stand of in de M/T-stand communiceren (voor het gebruik van uw gehoorapparaat verwijzen wij naar diens gebruiksaanwijzing). De Neklus Hanger maakt de verbinding tussen uw mobiele telefoon en uw gehoorapparaat draadloos. Wij raden u dringend aan om uw gehoorapparaat in de T-stand te zetten als u de Neklus Hanger gebruikt.

03

#### Verbinding met een Bluetooth mobiele telefoon Neklus Hanger in verbindingstatus

- Voordat u verbinding maakt verzeker u ervan dat de Neklus Hanger volledig is opgeladen en de batterijoplaadkabel niet aangesloten is. Mocht de Neklus Hanger uit zijn, druk de S1 toets in en houd deze vast tot de rode en blauwe LED om de beurt oplichten. Dit betekent dat de Neklus Hanger in verbindingstatus is.
- Volg de instructie van uw Bluetooth mobiele telefoon om de verbinding tot stand te brengen. Meestal gebeurt dit door een setup-of verbindingmenu om dan de optie in uw Bluetooth apparaat te kiezen. Bluetooth kan enige seconden nodig hebben om een verbinding te maken.
- Uw telefoondisplay zou moeten aangeven dat het de Neklus Hanger "Neckloop" gevonden heeft en zal u vragen of u de verbinding wilt maken. Dit moet u bevestigen. Een Bluetooth mobiel dat is uitgerust met BT2.1, heeft een eenvoudige verbindingsmogelijkheid zonder om een wachtwoord te vragen. Voor Bluetooth zonder 2.1 en eerdere modellen zal er om een wachtwoord of PIN gevraagd worden, toets dan "0000" in.
- De Neklus Hanger LED gaat om de 3 seconden oplichten als de verbinding succesvol is. Gewoonlijk zal de Neklus Hanger vragen of u de naam hiervan wilt veranderen, wij raden aan om de naam "Neckloop" niet te veranderen.
- Als de verbinding niet tot stand komt, zet de Neklus Hanger en de mobiele telefoon uit en wacht 10 seconden. Zet beide apparaten weer aan en herhaal alle stappen vanaf het begin. Zodra de mobiele telefoon en de Neklus Hanger verbonden zijn worden beide apparaten door elkaar herkend en hoeft de procedure niet herhaald worden.

### Tot stand komen van de Bluetooth verbinding

Nadat de verbinding tussen de Neklus Hanger en de mobiele telefoon tot stand is gebracht wilt u mogelijk een Bluetooth-verbinding opzetten, hierbij volgt u de gebruiksaanwijzing van uw mobiele telefoon. Om de verbinding mogelijk te maken druk kort op S1. Als u bijvoorbeeld een Nokia 6130i gebruikt, zal op de display de vraag verschijnen "Verbinding met de NECKLOOP accepteren?" U kiest dan "Ja" om de verbinding mogelijk te maken. U kunt nu bellen of gebeld worden met de Neklus Hanger. Voor andere mobiele telefoons moet u de gebruiksaanwijzing hiervan raadplegen.

Let op:

Nadat de Neklus Hanger is uitgezet zal de Neklus Hanger na het opnieuw aanzetten zich met het laatst gebruikte apparaat verbinden. Als de Neklus Hanger niet aangesloten is maar nog wel stroom heeft, druk dan kort op S1 om de verbinding te herstellen. Mocht er abnormaal verlies van de verbinding zijn (buiten bereik e.d.), zal de Neklus Hanger eenmaal automatisch proberen om een verbinding te maken met de mobiele telefoon.

05

### Beantwoorden van inkomende telefoongesprekken

Als u de Neklus Hanger draagt terwijl een telefoongesprek binnen komt, zal de Neklus Hanger rinkelen via de nekklus en uw gehoorapparaat op de T-stand. Om het telefoongesprek aan te nemen druk kort op de S1 toets.

Let op: Sommige mobiele telefoons zetten de bluetoothverbinding in de standby modus als deze lang niet is gebruikt. Als er een telefoonoproep komt zal de mobiele telefoon rinkelen en het zal enige seconden duren tot het telefoongesprek wordt doorverbonden met de Neklus Hanger. U moet wachten tot u de beltoon op uw Neklus Hanger hoort. Als u op S1 drukt voordat u de beltoon op uw Neklus Hanger hoort zal de Neklus Hanger een Bluetooth verbinding maken. Dit zal een conflict tussen de mobiele telefoon en de Neklus Hanger veroorzaken.

06

### Beëindigen van een telefoongesprek

Als u tijdens een telefoongesprek op de Neklus Hanger op de S1 toets drukt zal het gesprek worden beëindigd. Nadat het gesprek is verbroken zal de blauwe LED normaal weer oplichten.

07

### In de wacht zetten van telefoongesprek

Telefoongesprekken in de wacht, zal alleen mogelijk zijn als dit ondersteund wordt door uw SIM kaart of als uw mobiele telefoon uitgerust is met deze mogelijkheid.

Terwijl er een telefoongesprek gaande is (gesprek 1) op de Neklus Hanger en een ander gesprek komt binnen (gesprek 2) zult u een dubbele toon horen. Beide LEDs zullen gelijktijdig om de 2 seconden oplichten.

- Om gesprek 2 te beantwoorden druk 2 seconden op de S2 toets. U kunt zo wisselen tussen gesprek 1 en gesprek 2.
- Om het inkomende 2e gesprek af te wijzen druk kort op de S1 toets.

Beide LEDs de rode en de blauwe zullen gelijktijdig elke seconde oplichten als gesprek 1 of gesprek 2 gaande zijn. Als u in bezig bent met gesprek 2, terwijl gesprek 1 in de wacht is en u drukt kort op de S1 toets zal gesprek 1 worden beëindigd. Mocht u gesprek 2 willen beëindigen druk 2 seconden op de S3 toets.

07

### Dempen van de microfoon

Om de microfoon te dempen tijdens een telefoongesprek drukt u gelijktijdig 1 seconde op de S2 & S3 toets. U hoort een pieptoon als de microfoon gedempt is.

Om de demping van de microfoon te beëindigen drukt u gelijktijdig de S2 & S3 toets u hoort een pieptoon en de microfoon functioneert weer normaal.

## 08

**Doorschakelen van gesprekken** (voor Nokia N5700 of erop lijkende modellen)

Tijdens een telefoongesprek kunnen gesprekken doorgeschakeld worden van de Bluetooth mobiele telefoon naar de Neklus Hanger en van de Neklus Hanger naar de Bluetooth mobiele telefoon.

- Om een gesprek van de Bluetooth mobiele telefoon door te schakelen naar de Neklus Hanger: druk de S1 toets eenmaal en het gesprek wordt doorgeschakeld naar de Neklus Hanger.
- Om een gesprek door te schakelen van de Neklus Hanger naar de Bluetooth mobiele telefoon raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw mobiele telefoon.

## 09

### Nummer kiezen met spraakherkenning

Verzeker u ervan dat de spraakherkenningsfunctie van uw mobiele telefoon ingeschakeld is en zich binnen het bereik van de Neklus Hanger bevindt. Druk kort op de S1 toets van de Neklus Hanger. Er zal een piepton te horen zijn op de Neklus Hanger. U kunt nu u opgenomen spraakcommando's (bijv. de naam van de persoon) gebruiken. U zult binnen een paar seconden verbonden zijn.

## 10

**Nummerherhaling** (Alleen voor mobiele telefoons met handsfree functie)

Om het laatst gedraaide nummer te kiezen druk en houd de S3 toets tot u 4 tonen hoort. Dit betekent dat de nummerherhaling geactiveerd is.

## 10

### Afwijzing van een telefoongesprek

Om een telefoongesprek af te wijzen als de Neklus Hanger rinkelt, druk en houd de S1 toets tot u een toon hoort.

## 11

### Afstellen van de volume

Drukken en loslaten van de S2 toets tijdens een telefoongesprek zal het volume van de Neklus Hanger verhogen. Het drukken en loslaten van de S3 toets zal het volume van de Neklus Hanger verlagen. Er zal een toetsgeluid te horen zijn om aan te geven of het volume verhoogd of verlaagd wordt. Een waarschuwingston zal de horen zijn als de geluidsterkte het maximum of minimum bereikt heeft.

**Let op:** niet alle functie zijn beschikbaar op alle mobiele telefoons

## 11


### Batterijoplaad aanduiding

De Neklus Hanger LED zal rood in plaats van blauw oplichten als de batterij leeg raakt. Er zal periodiek een korte piep te horen zijn. Na deze waarschuwing zult u nog ongeveer 15 minuten tijd hebben om te praten. Als de batterij te leeg is, zal het apparaat zich uitschakelen. Het kan alleen ingeschakeld worden als de oplader aangesloten is of de batterij voldoende opgeladen is.

### Batterij opladen

Om de batterij op te laden verbindt de oplaadkabel met de Neklus Hanger. Tijdens het opladen verschijnt er een rood LED licht. Zodra de batterij volledig opgeladen is zal het rode licht uit gaan.

AC stopcontact en onderkant Neklus Hanger

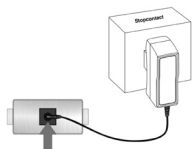

De mogelijke spreek- en standbytijd voor de Neklus Hanger kan verschillend zijn afhankelijk van de Bluetooth mobiele telefoon die een andere uitschakelmodus kunnen toepassen.

**Waarschuwing:** Het stopcontact voor de adapter dient zich bij voorkeur in de buurt van het apparaat bevinden en dient makkelijk te bereiken zijn.

### Opmerking:

Het LED zal niet aan gaan als de batterij van de Neklus Hanger bijna leeg is en zal pas aan gaan als de batterij opgeladen wordt, dit kan enige minuten duren.

## 12

### LED status

Led	Status
1x1 Sec. blauw	Spreeken
1x2 Sec. blauw	Verbonden met het Bluetooth apparaat
1x3 Sec. blauw	Klaar voor toegang voor verbonden apparaten
Oplichtend rood	Batterij bijna leeg (max 15 minuten resterende spreektijd)
Rode LED aan	Batterij laadt op
Rode LED uit	Batterij helemaal opgeladen
Rood/blauw oplichten	Verbindingstatus
Rood & blauw gelijktijdig aan	Gesprek in de wacht

## 13

### Storingen verhelpen

Geen geluid van de mobiele telefoon

1. Controleer of de batterij opgeladen is.
2. Controleer of de Neklus Hanger aan is.
3. Controleer of uw gehoorapparaat in de T-stand of M/T-stand is.
4. Controleer de status van uw mobiele telefoon.

Zacht geluid

1. Controleer of de batterij opgeladen is.
2. Controleer uw mobiele telefoon luidsterkte en het signaal van uw mobiele telefoon netwerk.

## 14

### Onderhoud en verzorging

1. Zorg dat de Neklus Hanger niet in handen van kinderen komt.
2. Let erop dat de Neklus Hanger onder droge omstandigheden opgeborgen wordt.
3. De Neklus Hanger mag niet aan buitensporig vochtige omstandigheden blootgesteld worden.
4. Vermijd dat de Neklus Hanger valt.
5. Door de Neklus Hanger en de externe microfoon niet in de buurt van water te gebruiken vermijdt u het gevaar van een elektrische schok.
6. Gebruik geen scherpe reinigingsmiddelen e.d. maak gebruik van een zachte doek om het apparaat te reinigen.
7. Laat de Neklus Hanger niet in de directe zon of extreme hitte achter.

## 15

### Federale communicatie commissie storting verklaring

Dit apparaat is getest en voldoet aan de eisen van een klasse b digitaal apparaat, op grond van deel 15 van de FCC wetten. Deze eisen zijn gemaakt om een redelijkerwijze bescherming tegen schadelijke storingen in de huiselijke installaties van elektrische apparatuur te voorkomen. Dit apparaat produceert, gebruikt en kan radiofrequentie energie uitstralen en, als het niet volgens de instructies geïnstalleerd en gebruikt wordt, kan schadelijke storingen veroorzaken bij radioapparatuur. Toch is er geen garantie dat deze storingen niet op kunnen treden in een installatie. Zou het apparaat schadelijke storingen veroorzaken bij de tv- of radioverbinding, die opgespoord kunnen worden door het apparaat aan en uit te zetten, wordt de gebruiker aangeraden om de volgende maatregelen te nemen:

- Stel de antenne opnieuw in en verplaats deze.
- Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger
- Verbindt het apparaat in een ander stopcontact dat op een

andere groep aangesloten is dan de ontvanger.

- Neem contact op met de dealer of een ervaren radio/tv installateur.

- Dit apparaat voldoet aan de normen van de FCC eisen, deel 15. Ingebruikname is toegestaan onder de volgende voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke storingen veroorzaken, en (2) dit apparaat moet elke storing aan kunnen, ook storingen die een onwenselijk werking kunnen veroorzaken.

### Belangrijke opmerking

Stralingsblootstellingverklaring

Dit apparaat voldoet aan de grenzen van de FCC stralingblootstellingsverklaring voor een ongecontroleerde omgeving. De eindgebruiker moet de specifieke instructies en gebruiksaanwijzing volgen om aan de RF blootstellingseisen te voldoen. Om aan de vereisten te blijven voldoen wordt aanbevolen de instructies en de gebruiksaanwijzing te volgen. De zender mag niet samen met een andere antenne of zender gebruikt worden.

### Correcte verwijdering van dit product



Dit teken geeft aan dat dit product niet in de gewone vuilcontainer hoort volgens de EU regelgeving. Om milieuschade, of schade aan mensen te voorkomen is het wenselijk om het te recyclen voor hergebruik. Teruggave van het product is mogelijk in de milieustraat van uw vuilverwerker en bij de dealer waar u het product gekocht heeft. Zij zorgen ervoor dat dit product milieuvriendelijk ontzorgd wordt.



Het CE kenmerk is verplicht merk op veel producten in EU. Het CE kenmerk certificeert dat dit product overeenstemt met de in de EU overeengekomen regels i.v.m. zekerheid, gezondheid van de consument en het milieu.

## 16

### CE verklaring

Wij,

**Bedrijf:** IN-TECH ELECTRONICS LTD.

Met ons,

**Product(s)** BLUETOOTH NEKLUS HANGER

**Model No.:** BH 03

verklaart dat het product aan de eisen uitgezet in de richtlijn van de raad op de approximatie van de wetgevingen van de lidstaten gerelateerd aan de R&tte Directive (1999/5/EC) als ook aan de laagspanning wetgeving 2006/95/EC. Voor de evaluatie van de boven genoemde wetgevingen, werden de volgende standarten toegepast:  
**EMC**

**EN 301 489-17 V1.3.2 (2008-04)**

**EN 301 489-1 V1.8.1 (2008-04)**

**EN55022: 2006**

**EN61000-3-2: 2006**

**EN61000-3-3: 1995+A1+A2**

**EN50371:2002**

**EN 300 328 V1.7.1 (2006-10)**

**LVD EN60950-1 : 2006**

De onderstaande fabrikant is verantwoordelijk voor deze verklaring:

**In-Tech Electronics Ltd**  
**Unit A, 13/F, Wing Tai Centre, 12 Hing Yip Street,**  
**Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong.**